


スロープの走行における注意点


降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。

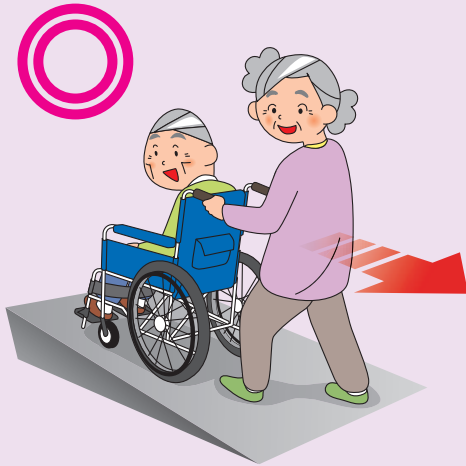

スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。


段差の高さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
歩行器	65cm	70cm	75cm	80cm	85cm	90cm	95cm	100cm	105cm	110cm	115cm	120cm
車椅子・ 車椅子 付属品	120cm	125cm	130cm	135cm	140cm	145cm	150cm	155cm	160cm	165cm	170cm	175cm
移動用 リフト・ つり具	175cm	180cm	185cm	190cm	195cm	200cm	205cm	210cm	215cm	220cm	225cm	230cm
介護保険 購入 対象品	205cm	210cm	215cm	220cm	225cm	230cm	235cm	240cm	245cm	250cm	255cm	260cm
販売品	245cm	250cm	255cm	260cm	265cm	270cm	275cm	280cm	285cm	290cm	295cm	300cm

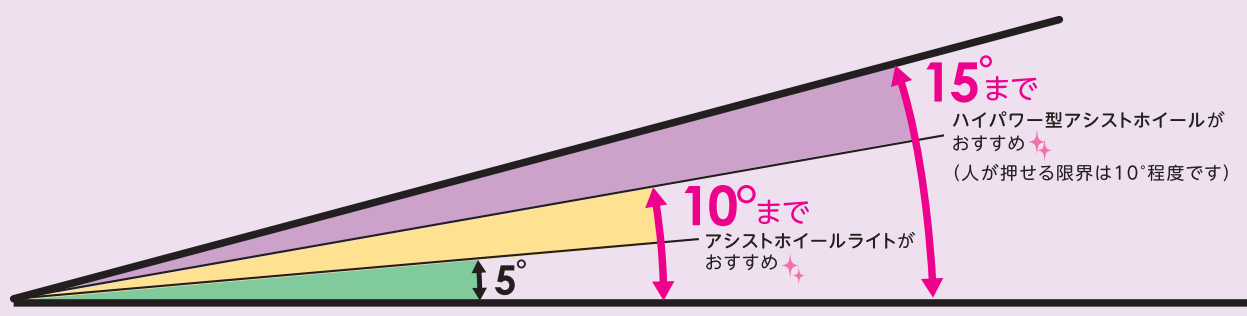


ケアスロープ

ケアメディックス

折り畳み時
全幅 35

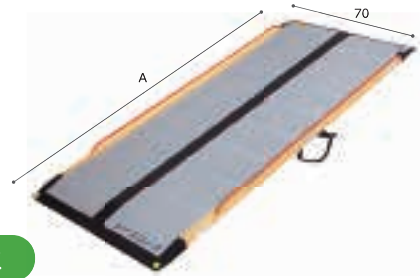

STEP 1

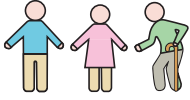

介助者の状況を確認し、選定してください。
段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°
スロープの長さ
||
段差の高さ × 8倍以上

ケアスロープ選定理由例

《CS-175》
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車いすが安全に移動できるスロープとして選定。

STEP 2

日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。




下部までエッジが無いので、狭い場所で車椅子が直角に乗り入れしやすい設計です。

アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く丈夫で安全に走行することができます。

STEP 3



収納しやすい自立設計です。
様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。

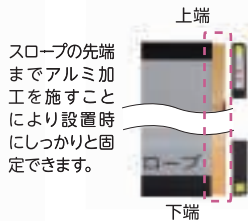

スロープの先端までアルミ加工を施すことにより設置時にしっかりと固定できます。

STEP 4

設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認しうえでご利用ください。

走行面にソフトなすべり止めを採用しているため、室内使用時にスロープの上を裸足でも歩いて痛みありません。



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

商品名	A(cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約3	28-0979-1	00093-000015	円	円	円	円
CS-100	100	約5	28-0980-1	00093-000016	円	円	円	円
CS-120	120	約6	28-0981-1	00093-000017	円	円	円	円
CS-150	150	約8	28-0982-1	00093-000018	円	円	円	円
CS-175	175	約9	28-0983-1	00093-000019	円	円	円	円
CS-200	200	約10	28-0984-1	00093-000020	円	円	円	円
CS-240C	240	約12	28-1015-1	00093-000021	円	円	円	円
CS-285C	285	約15	28-1092-1	00093-000038	円	円	円	円

ケアスロープJ/ケアスロープJ用ジョイント台

ケアメディックス

- スロープを2本つなぎ合わせることで高段差に対応。
- 3つのパーツに分割ができるので運搬、収納が容易です。
- 可搬型スロープでは無い約4mの長尺スロープになります。

下端側ケアスロープ + ケアスロープJ用ジョイント台 + 上端側ケアスロープ = ケアスロープJ



※全長、重さはジョイント台含む ※ケアスロープJ用ジョイント台 幅78×長さ42.5×高さ21~26cm ※スロープ2台とジョイント台をセットにしたときに介護保険適応となります

商品名	スロープ全長	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CSJ-300	313	約28	28-1064-1	00093-000022	円	円	円	円
CSJ-325	338	約29	28-1065-1	00093-000023	円	円	円	円
CSJ-350	363	約30	28-1066-1	00093-000024	円	円	円	円
CSJ-390	403	約32	28-1067-1	00093-000025	円	円	円	円
CS-J (ケアスロープJ用ジョイント台)		約12	28-1035-1		円	円	円	円

介護保険
購入
対象品


販売品

情報



ダンスロープエア-2

ダンロップホームプロダクツ

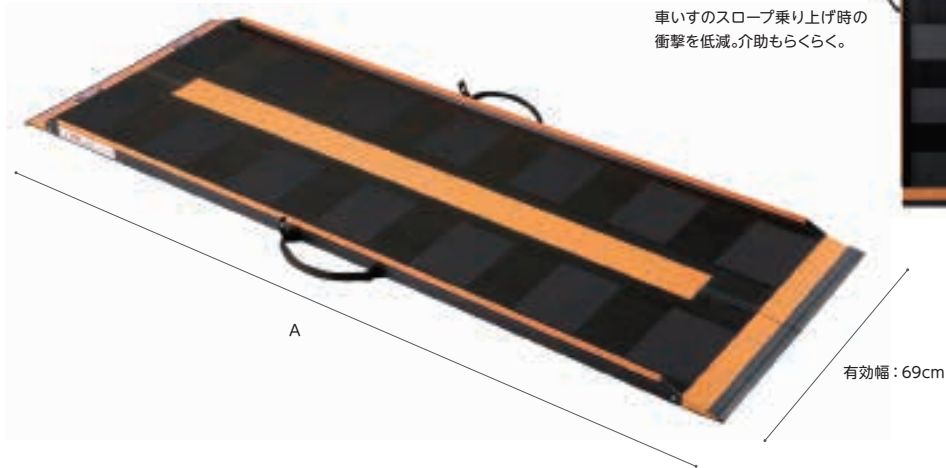

1.業界最軽量クラス^{※1}

スロープのリーディングカンパニーとして、培われた軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのスロープを開発。

2.乗り上げ時の衝撃を低減^{※2}

車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。



3.汎用性の向上^{※2}

全サイズの幅を70cm未満とし、今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。サイズ展開も7サイズあり、様々な住宅環境に適応可能です。

4.安全性の向上^{※2}

側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。

5.補修性の向上^{※2}

レンタル事業者様における補修作業を簡便化。

※1 JIS認証された車いす用可搬形スロープにおいての他社比較(2020年8月メーカー調べ)
※2 ダンロップホームプロダクツ社従来品との比較



商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-205Z	205	約8.5	28-1178-1	00532-000051	円	円	円	円
R-230Z	230	約9.6	28-1179-1	00532-000050	円	円	円	円
R-255Z	255	約10.5	28-1180-1	00532-000049	円	円	円	円
R-285Z	285	約11.5	28-1181-1	00532-000048	円	円	円	円

インタースロープ

モルテン

小さな段差による歩行時のつまづきの防止や、車いす走行時の負担を軽減




商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
111cm×3cm	1.7	28-1072-1	00054-000196	円	円	円	円
111cm×3.5cm	2.5	28-1073-1	00054-000197	円	円	円	円
111cm×4cm	2.1	28-1074-1	00054-000198	円	円	円	円
111cm×4.5cm	3.2	28-1075-1	00054-000199	円	円	円	円
111cm×5cm	4.4	28-1076-1	00054-000200	円	円	円	円
111cm×5.5cm	3.9	28-1077-1	00054-000201	円	円	円	円
111cm×6cm	5.5	28-1078-1	00054-000202	円	円	円	円

エコ段差スロープN

マツ六

置くだけで「つまずき」の原因の
段差を解消!

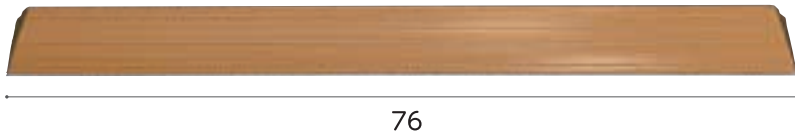

商品名	高さ (cm)	奥行き (cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	円	円	円	円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	円	円	円	円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	円	円	円	円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	円	円	円	円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	円	円	円	円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	円	円	円	円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	円	円	円	円
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	円	円	円	円
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	円	円	円	円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	円	円	円	円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	円	円	円	円

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品


安心のご提案

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

滑りにくく、足にソフトな素材




端部は安心のラウンド加工

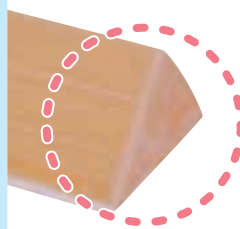


車椅子や歩行者が
側面からアプローチしても
ラウンド加工されているので
安心です。

安心のずれ防止仕様

置くだけでずれにくい
特殊仕様

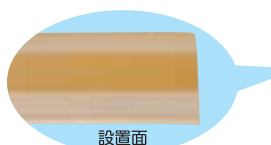


設置面

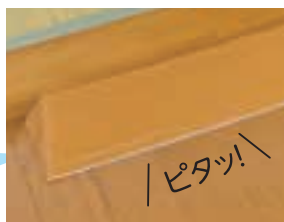

勾配は全タイプ14°

断面図 ※敷居にピッタリと付けてください。

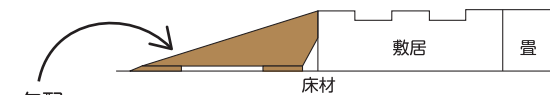

車椅子での段差越えや歩行での
つまずき防止に安心です。

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報